



### PAD IN POLIURETANO

#### Per la pulizia

Utilizzare un panno morbido e detergente neutro non aggressivo. Non utilizzare solventi, acidi o detersivi abrasivi.

#### Per la disinfezione

Si raccomanda l'alcol denaturato o l'alcol etilico in una concentrazione massima del 5%.\*

**Prima di disinfettare l'intera superficie di qualsiasi componente, si consiglia comunque di procedere facendo delle prove su una piccola parte del prodotto.**

#### NOME PRODOTTO

**Npr**

#### TIPOLOGIA

**Pad in PU (Morbido)**

#### MATERIALI

**Poliuretano**

\* Analisi degli effetti derivanti dall'applicazione di prodotti chimici sulle superfici dei prodotti, eseguite presso un laboratorio accreditato.