



PAD IN POLIURETANO

Per la pulizia

Utilizzare un panno morbido e detergente neutro non aggressivo. Non utilizzare solventi, acidi o detersivi abrasivi.

Per la disinfezione

Si raccomanda l'alcol denaturato o l'alcol etilico in una concentrazione massima del 5%.*

Prima di disinfettare l'intera superficie di qualsiasi componente, si consiglia comunque di procedere facendo delle prove su una piccola parte del prodotto.

NOME PRODOTTO

Standard

TIPOLOGIA

Pad in PU (morbido)

MATERIALI

Poliuretano

* Analisi degli effetti derivanti dall'applicazione di prodotti chimici sulle superfici dei prodotti, eseguite presso un laboratorio accreditato.